


FreeStyleリブレLink更新版のご使用に関するお知らせ

2022年11月中旬以降にFreeStyleリブレのLinkモバイルアプリの更新バージョン（v2.8.1）を各アプリストアよりリリース予定です。以下の変更点がございますのでご使用される際は、本ご案内を確認のうえご使用ください。

主な更新内容-1

スマートインスリンペンとの連携機能

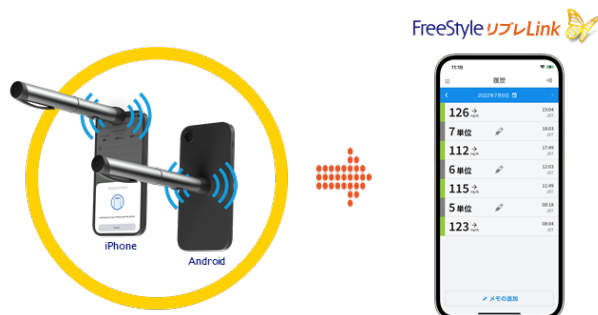

データ連携

互換性のあるスマートインスリンペンをスキャンして追加し、インスリン投与量をアプリに転送します。

データ確認

患者さんは、アプリで過去のインスリン投与量とグルコース測定値を確認出来ます。

スマートインスリンペンとのデータ連携機能が実装されます。

互換性のあるスマートインスリンペン、詳しい設定方法等は、アプリ更新後、「ヘルプ」メニュー内の「インスリンペンの取扱説明書」をご参照ください。

スキャンアイコン表示の変更（iOSのみ）

スキャンボタンのアイコン表示が、一般的なNFCのアイコンに変更となります。

改定前



改定後



主な更新内容-2

メニュー表示変更

Androidでメニュー画面が2つに分かれていたものが、メインメニューに統一されます。（現iOSと同様の仕様になります。） またメニュー画面表示が一部修正・追加となります。（iOS/Android共通）

改定前

メインメニュー

オーバーフローメニュー

改定後


メインメニュー

※「アプリ連携済み」→「連携アプリ」へ表示変更


※インスリンペンのメニューが追加

メニューも以下の点が改訂 (iOS/Android共通)

研究目的のデータ使用任意同意

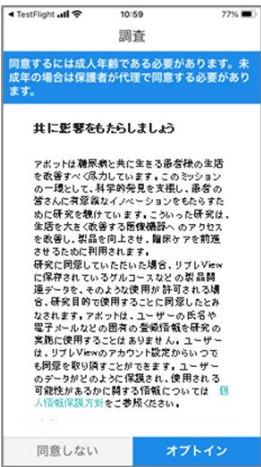

アカウント削除メニュー追加(iOSのみ)

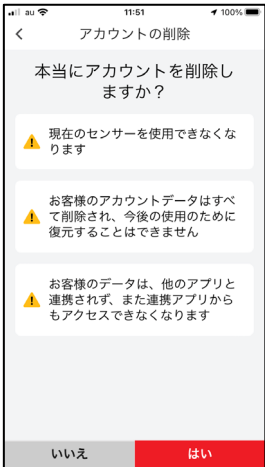

スマートフォンご利用推奨環境の更新

iOS/Android	OS/Model	現行バージョン v2.5.3	更新バージョン v2.8.1
iOS	最小OS	OS 13	OS 14.5
	最小Model	iPhone 7	iPhone 8
Android	最小OS	7.1	8
	Model	更新予定*	更新予定*

アプリダウンロード、及び推奨環境、使用可能なスマートフォン端末はこちら



<https://www.myfreestyle.jp/patient/freestyle-libre-link/download.html>

*Android端末の推奨リストを含む最新の推奨環境は、アプリ更新時に上記弊社Webサイト上でご案内予定です。